

PROTOCOLO EXTRACCIÓN DE ESPIGAS




1- Visualizar la espiga encrustada.



2- Seleccionar la guía de centrado según conexión y plataforma.



3- Colocar la guía de centrado sobre el implante.

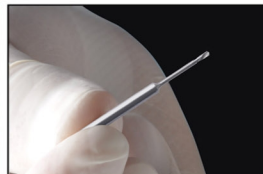

4- Seleccionar la fresa FEX100.



5- Poner la fresa en el contraángulo.



6- Perforar directamente en la guía de centrado con el contraángulo.




7- Retirar la guía y perforar la espiga con el contraángulo.



8- Seleccionar el punzón de extracción.



9- Insertar el punzón en la espiga.

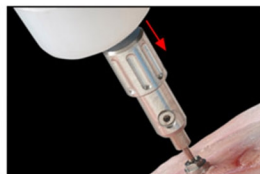

10- Golpear el punzón con la ayuda de un martillo.



11- Extraer la espiga.


MICRODENT
IMPLANT SYSTEM

ANEXO-IU-EE
Edición 3 - de 27 de Septiembre de 2012