


## ENVASE IMPLANTES




1. Abrir el tapón de rosca del envase del implante en sentido antihorario.




2. El envase dispone de un opérculo de aluminio que hay que retirar mediante la pequeña solapa.

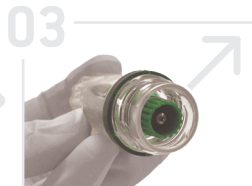

3. Extraer el envase del implante. El portaimplante plástico lleva incorporado el tornillo de cierre.

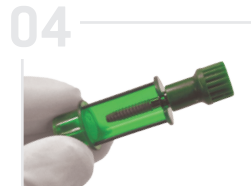


4. Utilizar el portaimplante plástico y colocarlo en el cuadrado del portaimplante metálico.

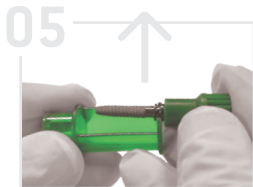

5. Sacar el implante levantándolo verticalmente hacia arriba.



6. Se puede llevar el implante a boca con el contra-ángulo insertándolo directamente en el portaimplante metálico.

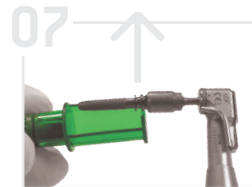

7. Hacer el mismo movimiento que en la fig.5, extraerlo levantándolo hacia arriba.