

# KIT DE TOPES PARA FRESAS



## KIT DE TOPES MICRODENT

El nuevo Kit quirúrgico de topes para fresas Microdent simplifica el proceso de fresado y aporta un perfecto control de profundidad de la osteotomía que repercute en la seguridad del paciente. La codificación por colores y las distintas guías de medición permiten realizar los protocolos de fresado con seguridad.



Un completo kit de 36 topes para fresas cortas y largas, para la colocación de implantes de 6mm a 16mm de longitud, codificados por colores de la siguiente forma:




- **Azul celeste** para fresas de 1,50mm y 1,80mm.
- **Amarillo** para fresas de 2,50mm y 2,80mm.
- **Violeta** para fresas de 3,00mm y 3,20mm.
- **Verde** para fresas de 3,50mm y 3,80mm.
- **Bronce** para fresas de 4,20mm y 4,50mm.
- **Azul oscuro** para fresas de 5,10mm.

También contiene una llave que ayuda a extraer y a retirar los topes, una guía que mide la relación entre el tope y el implante y una guía de profundidad de fresado.



# PROTOCOLO QUIRÚRGICO

1. Inserte la fresa montada en el contra-ángulo en el tope elegido según el implante que vaya a colocar. [Las Ref. L6/ L8/ L10... indican la longitud del implante].
2. Compruebe en la placa la profundidad de fresado para estar seguro del tope seleccionado usando la guía de profundidad de fresado.
3. Una vez realizado el fresado, extraiga el tope con la llave como indican las imágenes y deposítelo en la bandeja metálica.
4. Seleccione el siguiente tope de la misma longitud y continúe el protocolo aumentando el diámetro de fresa como realizaría en un protocolo convencional hasta completarlo.
5. Una vez realizada la intervención y depositados los topes utilizados en la bandeja metálica, le será muy útil la guía de medición Relación tope/implante para volver a colocarlos en su ubicación correspondiente.

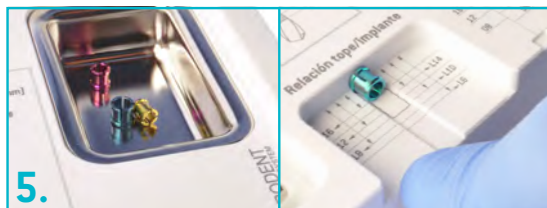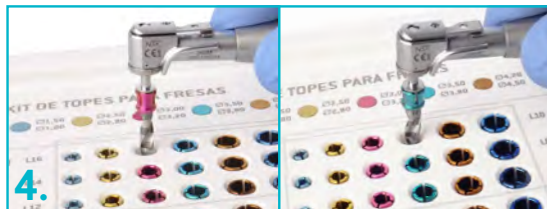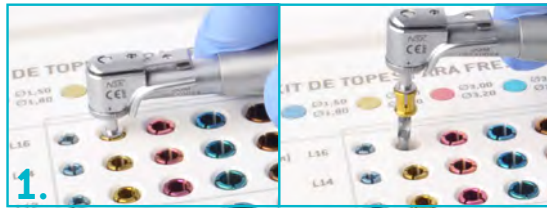

\*En cualquier momento puede comprobar tanto la profundidad de fresado como la relación tope/implante para estar seguro del tope seleccionado.

## MUY IMPORTANTE

Los topes para las fresas largas son para implantes de 6mm (L6, izquierda) a 16mm (L16, izquierda).

\*Ver recuadro y dibujo fresas largas.

Los topes para las fresas cortas son para implantes de 6mm (L6, derecha) a 10mm (L10, derecha).

\*Ver recuadro y dibujo fresas cortas.

## FRESAS PARA EL KIT DE TOPES

Dispone de 11 fresas cortas y 11 fresas largas adaptadas a los topes de fresa según diámetros para realizar los protocolos quirúrgicos necesarios en toda la gama de implantes Microdent.

Ver equivalencia color del tope/diámetro de fresa.

Ø Disponibles	Corta	Larga	Color del tope
Ø 1,50mm	FTI150C	FTI150L	●
Ø 1,80mm	FTI180C	FTI180L	●
Ø 2,50mm	FTI250C	FTI250L	●
Ø 2,80mm	FTI280C	FTI280L	●
Ø 3,00mm	FTI300C	FTI300L	●
Ø 3,20mm	FTI320C	FTI320L	●
Ø 3,50mm	FTI350C	FTI350L	●
Ø 3,80mm	FTI380C	FTI380L	●
Ø 4,20mm	FTI420C	FTI420L	●
Ø 4,50mm	FTI450C	FTI450L	●
Ø 5,10mm	FTI510C	FTI510L	●



\*Las fresas se venden por separado.

