



INSTRUCCIONES DE USO PARA LA LLAVE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SISTEMA Micro-Loc

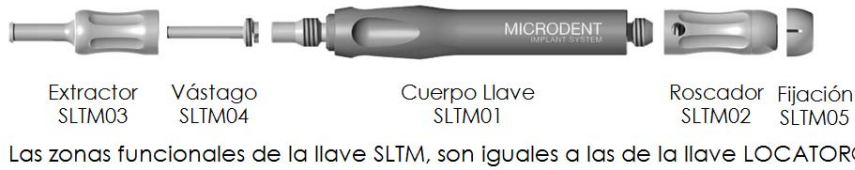


NOTA: Para insertar un nuevo retenedor o un pilar Micro-Loc empiece por el paso 1.
Para retirar el retenedor de nylon empiece por el paso 2.


1. Para colocar un nuevo retenedor de nylon dentro de la cofia para sobredentaduras, separe el accesorio “Extractor” (SLTM03) del “Cuerpo llave” (SLTM01) y use el extremo del “Cuerpo llave” (SLTM01), tal y como muestra el dibujo.

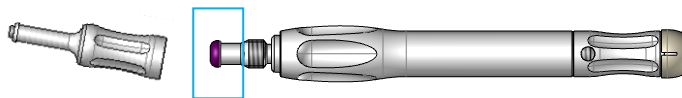


La “Fijación” de plástico (SLTM05), situada en la punta del “Rosgador” (SLTM02), está diseñada para sostener el pilar Micro-Loc al destornillador y permite que este se sujete verticalmente sin soltarse, ayudando a llevar el pilar a la boca del paciente.

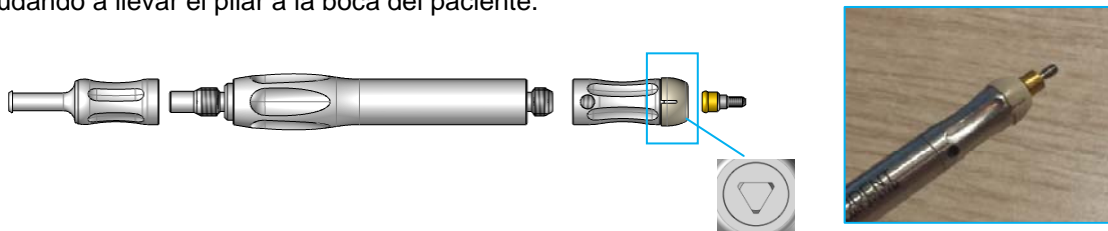


2. Para extraer un retenedor de nylon fijado en la cofia, afloje el accesorio “Extractor” (SLTM03) haciendo 2 giros completos a la izquierda (observará una brecha visible).

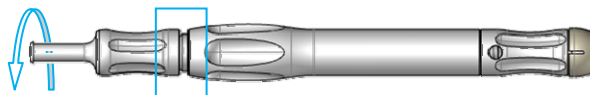

Inserte la punta dentro del conjunto retenedor/cofia y empuje verticalmente hasta el fondo del retenedor de nylon. Luego incline la llave de modo que el borde afilado de la punta capture el retenedor, estirando hacia atrás y sacándolo de la cofia.

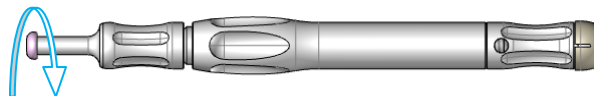

Para desechar el retenedor extraído, apunte la llave hacia abajo alejándola de usted y gire de nuevo el accesorio “extractor” (SLTM03) hacia la derecha dentro del “Cuerpo llave” (SLTM01). Esta maniobra activará la extracción del “vástago” (SLTM04) y expulsará el retenedor de nylon deteriorado del extremo en punta.

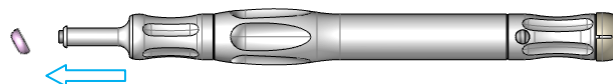

NOTA: No intente usar el accesorio “Extractor” (SLTM03) para colocar los retenedores, ya que pueden resultar dañados.