

Para una correcta utilización de nuestros productos se recomienda que el profesional se forme en las particularidades de su uso. Implant Microdent System S.L.U organiza, periódicamente, cursos de formación, donde se informa de las particularidades de cada uno de los componentes del instrumental quirúrgico, así como de su correcta utilización. De igual forma estas informaciones están disponibles en la página web de la empresa [www.microdentssystem.com](http://www.microdentssystem.com) y en las diversas publicaciones que se editan.

#### INDICACIONES

Implant Microdent System S.L.U pone en el mercado los productos requeridos que permiten la aplicación y uso de sus sistemas implantológicos.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para una adecuada selección de nuestros productos se aconseja consultar los catálogos de productos editados.

El producto no sanitario puesto en el mercado por Implant Microdent System S.L.U está fabricado en acero inoxidable, titanio grado 5 según ISO 5832-3 y POM.

#### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

##### Envasado

Implant Microdent System S.L.U garantiza que todos sus productos siguen un proceso de fabricación, control y limpieza extrema antes de ser envasados.

Los productos Microdent pueden presentarse en diferentes modalidades de envase. Se identificará el producto contenido, con su correspondiente etiqueta.

##### Estado de suministro del producto.







Los productos no sanitarios Microdent se presentan en estado **no estéril**. Deberá ser esterilizado por el facultativo antes de su uso, en el caso que se requiera.

Para proceder correctamente a la primera esterilización del producto se deberán seguir los siguientes pasos:

- Extracción del producto del envase en el que se suministra. Este envase no permite la adecuada esterilización del producto contenido.
- Introducir el producto en un envase o bolsa adecuada para su esterilización y que garantice la no contaminación hasta su uso definitivo.
- Se recomienda el proceso de esterilización de vapor mediante autoclave. Se deberán tener en cuenta las particularidades del equipo que se posea. Los parámetros recomendados según UNE-EN ISO 17665-1 y UNE-EN ISO 17665-2 son:
  - Temperatura: 134° C
  - Ciclo de esterilizado: 3'

#### SÍMBOLOS DEL ETIQUETADO

En la etiqueta del producto aparecen las siguientes indicaciones:

	Número de referencia
	Consúltense las instrucciones de uso.
	Número de lote.
	Precaución, consúltense las advertencias.
	Fabricante
	Número global artículo comercial.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Los productos Microdent forman parte de un concepto global, habiéndose adecuado su diseño a los productos fabricados por Implant Microdent System S.L.U, por tanto, la utilización de productos ajenos a la marca puede provocar un comportamiento no óptimo.

Cuando el producto haya entrado en contacto con agentes contaminantes, muy especialmente sangre y saliva, debe ser limpiado y esterilizado antes de ser utilizado en otro paciente.

Los productos deben ser usados sólo para la función para la cual fueron especificados.

Advertimos del riesgo de toxicidad y alergenidad para aquellos pacientes sensibles a los materiales descritos en el apartado "DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO".

Antes de proceder a la cirugía es responsabilidad del profesional usuario comprobar:

- El estado del envase del producto y si coincide con el producto requerido para el paciente.
- El estado del propio producto para comprobar que es el óptimo.

Para una correcta limpieza de los productos se deberán seguir las siguientes indicaciones:

- No utilizar productos de limpieza o desinfección, a base de cloro o ácidos.
- Evitar todo producto que contenga un aldehído, dada la capacidad de estos para fijar las proteínas.
- Eliminar meticulosamente todos los residuos que hayan quedado en la superficie o el interior del producto.  
Para esta labor utilizar un cepillo de cerdas de nylon.
- En el caso de los productos que presenten aristas de corte, evitar en la medida de lo posible los golpes y en contacto con otros productos que puedan dañar la superficie y/o los filos de corte de las mismas.
- Inmediatamente después de proceder al proceso de limpieza, aclarar con agua destilada y secar meticulosamente.

**Un secado incorrecto puede ser causa de aparición de puntos de oxidación superficial en los productos.**

Los productos no sanitarios, están sometido a desgaste por su uso, siendo responsabilidad del usuario la renovación periódica de estos productos.

Implant Microdent System S.L.U aconseja que se disponga de productos de sustitución.

Con carácter general, durante el uso intraoral de nuestros productos el usuario debe tomar las debidas precauciones para evitar su aspiración por parte del paciente.

#### RESPONSABILIDADES, SEGURIDAD Y GARANTÍA

Si por motivo del transporte, el envase y el producto contenido fuese dañado, Implant Microdent System S.L.U lo restituirá sin cargo alguno.

La evidencia de manipulación del producto exime de la responsabilidad anteriormente indicada.

La garantía será aplicada a los productos de Implant Microdent System S.L.U siempre que hayan sido utilizados siguiendo las instrucciones de uso indicadas.

Para proceder a la devolución de los productos a que hacen mención estas instrucciones de uso se deberán seguir las normas establecidas en nuestras condiciones de venta y suministro.

Cualquier anomalía debe analizarse cuidadosamente para comprobar su eficacia y posibles consecuencias adversas y documentarse.

Fabricante: Implant Microdent System S.L.U  
 Pol. Ind. Can Magre C/. Carles Buigas, 1  
 Sta. Eulalia de Ronçana (Barcelona)



**PRECAUCIONES Y NORMAS DE USO PARA PRODUCTOS NO SANITARIOS**  
**Sistema implantológico de conexión externa e interna**