

ENVASE IMPLANTES con pilar multifunción

ANEXO - IU - IMP- PMF
(Edición 3: 01 - 10 - 2021)




1. Abrir la caja exterior del implante por la pestaña lateral.



2. Extraer el blíster que contiene el implante.



3. Retirar la tapa protectora del blíster mediante la solapa habilitada.

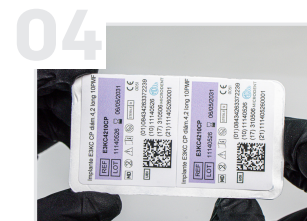

4. La tapa protectora contiene 2 etiquetas, una debe ir en el pasaporte del paciente y la otra en el historial clínico.



5. Extraer del blíster el vial contenedor del implante. El tapón de plástico lleva incorporado el tornillo de cierre del implante.



6. Retirar el tapon del vial.



7. A continuación, el implante se podrá retirar con la llave manual para pilares multifunción.



8. También es posible la extracción del implante con la llave de contra-ángulo para pilares multifunción.



MICRODENT