

# ENVASE IMPLANTES MONOBLOQUE

ANEXO - IU - IMP - WE  
(Edición 1: 01 - 10 - 2021)



1. Abrir la caja exterior del implante por la pestaña lateral.



2. Extraer el blíster que contiene el implante.




3. Retirar la tapa protectora del blíster mediante la solapa habilitada.



4. La tapa protectora contiene 2 etiquetas, una debe ir en el pasaporte del paciente y la otra en el historial clínico.



5. Extraer del blíster el vial contenedor del implante.

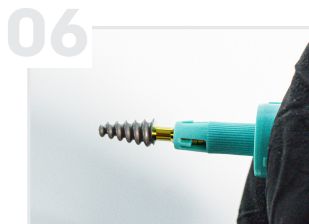

6. Sacar el implante monobloque levantándolo verticalmente hacia arriba.



7. Opcional: Puede separar el implante monobloque del tapon de ensamblado para facilitar su inserción en dientes del sector posterior.



**MICRODENT**