

ENVASE IMPLANTES

ANEXO - IU - IMP (Edición 4: 01 - 10 - 2021)




1. Abrir la caja exterior del implante por la pestaña lateral.



2. Extraer el blíster que contiene el implante.



3. Retirar la tapa protectora del blíster mediante la solapa habilitada.

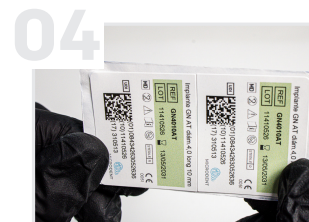

4. La tapa protectora contiene 2 etiquetas, una debe ir en el pasaporte del paciente y la otra en el historial clínico.



5. Extraer del blíster el envase contenedor del implante. El tapón de plástico lleva incorporado el tornillo de cierre del implante.



6. Colocar el portaimplante plástico en el cuadrado del portaimplante metálico.



7. Extraer el implante levantándolo verticalmente hacia arriba.



8. También es posible llevar el implante a boca con el contra-ángulo, insertándolo directamente en el portaimplante metálico.



MICRODENT