

# EMBALAGEM DE IMPLANTES com pilar multifuncional

NU - IMP- PMF - ANEXO  
(Edição 1: 01 - 10 - 2021)




1. Abrir a caixa exterior do implante pela patilha lateral.



2. Retirar o blister que contém o implante.



3. Remover a tampa protetora do blister através da patilha indicada.

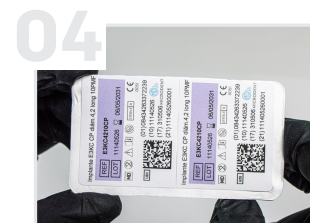

4. A tampa protetora contém 2 etiquetas: uma deve ser colocada no passaporte do paciente e a outra no prontuário clínico.



5. Retirar do blister o frasco que contém o implante. A tampa de plástico incorpora o parafuso de cobertura do implante.



6. Remover a tampa do frasco.



7. Em seguida, o implante poderá ser retirado com a chave manual para pilares multifuncionais.



8. Também é possível retirar o implante com a chave de contra-ângulo para pilares multifuncionais.



**MICRODENT**