

EMBALAGEM DE IMPLANTES MONOBLOCO

NU - IMP - WE - ANEXO
(Edição 1: 01 - 10 - 2021)



1. Abrir a caixa exterior do implante pela patilha lateral.



2. Retirar o blister que contém o implante.



3. Remover a tampa protetora do blister através da patilha indicada.



4. A tampa protetora contém 2 etiquetas: uma deve ser colocada no passaporte do paciente e a outra no prontuário clínico.



5. Retirar do blister o frasco que contém o implante.



6. Retirar o implante monobloco levantando verticalmente para cima.



7. Opcional: O implante monobloco pode ser separado da tampa de montagem para facilitar a sua inserção em dentes do setor posterior.



MICRODENT