

EMBALAGEM DE IMPLANTES

NU - IMP - ANEXO (Edição 1: 01 - 10 - 2021)




1. Abrir a caixa exterior do implante pela patilha lateral.



2. Retirar o blister que contém o implante.



3. Remover a tampa protetora do blister através da patilha indicada.

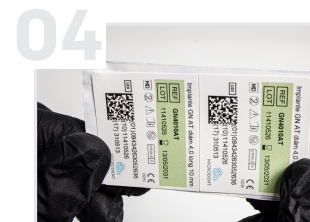

4. A tampa protetora contém 2 etiquetas: uma deve ser colocada no passaporte do paciente e a outra no prontuário clínico.



5. Retirar do blister o recipiente que contém o implante. A tampa de plástico incorpora o parafuso de cobertura do implante.



6. Colocar o porta-implante de plástico no encaixe quadrado do porta-implante metálico.



7. Retirar o implante levantando verticalmente para cima.



8. Também é possível levar o implante à boca com o contra-ângulo, inserindo diretamente no porta-implante metálico.



MICRODENT