



La elección de millones de
dentistas de todo el mundo.

Implanter LED **PLUS**

Potencia, precisión y máxima visibilidad
en cada intervención.



+ Info



MICRODENT

www.microdentsystem.com | info@microdentsystem.com | Telf. 93 844 76 50

RUMAR | Mayorista dental garantiza el servicio postventa de este producto a través de los distribuidores / servicios técnicos colaboradores.

Implanter LED PLUS

WOODPECKER



**¡TODO LO QUE NECESITAS
EN UN MOTOR DE IMPLANTES!**

CONTRA ÁNGULO INCLUIDO

8 programas memorizables completamente personalizables

Velocidad, par, flujo de refrigerante y dirección de rotación.

- 1. Positioning / Posicionamiento:** para marcar el área de implantación en el hueso con una fresa de bola.
- 2. Hole Drilling / Fresado:** para hacer el fresado, el cual definirá la profundidad y la dirección del orificio.
- 3. Hole Broadening / Ensanchamiento:** para determinar el diámetro del orificio del implante.
- 4. Tapping / Marcado rosca:** para hacer la rosca en el lecho, lo que viene siendo la guía para el implante.
- 5. Implanting / Implantación:** para colocar el implante.
- 6. Lock the abutmen Screw / Colocación del tornillo del pilar:** su función es colocar el tornillo que cubrirá el implante durante la primera fase del tratamiento.
- 7. User Define Mode / Modo definido por el usuario:** en este modo podemos cambiar entre diferentes contra ángulos y piezas de mano dependiendo del procedimiento que queramos realizar
- 8. Cleaning / Limpieza:** Descarga suero sin ninguna rotación del motor para el lavado del área.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transmisiones:	1:1, 1:2, 1:3, 1:5, 16:1, 20:1 y 27:1
Par de apriete	5 - 80 N.cm
Pantalla táctil	Touch LED de 7"
Fuente de alimentación	220 V
Rango de velocidad del motor	15 - 40.000 rpm
Sistema de irrigación	Bomba peristáltica integrada en el aparato, silenciosa, de fácil conexión, completamente aislada y con acceso frontal
Flujo de agua	0 - 120 ml/min
Dimensiones	276 x 267 x 110 mm
Peso	3,54 Kg
Suministro incluye	Pedal multifunción; micromotor; contra ángulo 20:1 con luz LED (Contra ángulo, micromotor y cable esterilizables) y maletín metálico ligero para transportar
Garantía	24 meses unidad / 12 meses micromotor y contra ángulo

Gran pantalla LCD 7"

Cuenta con un gran display de fácil lectura que muestra todos los valores seleccionados de manera claramente visualizable, proporcionando feedback en tiempo real. Su pantalla táctil es **amplia, clara e intuitiva**, lo que la hace fácil de utilizar incluso con guantes.



Fácil de limpiar aún siendo una pantalla táctil



Bomba Peristáltica

Rendimiento constante
incluso en los **casos**
más complejos.



PEDAL MULTIFUNCIÓN

Permite operar el dispositivo sin tocarlo.

- Ajuste flujo refrigerante
- Cambio de programa
- Dirección de rotación
- Control velocidad
- **Longitud del cable del pedal: 2,8m**



MALETÍN METÁLICO LIGERO PARA TRANSPORTAR



Micromotor brushless potente y estable

- El micromotor es **potente y estable**, con una capacidad de hasta **80 N.cm**.
- **Sin escobillas**, lo que le proporciona un alto rendimiento y durabilidad, además de un **bajo nivel sonoro y de vibración**.
- Su peso de **140 g** minimiza la fatiga de la mano.
- Con su **cable de 180cm**, permite trabajar de forma **cómoda** en un **amplio** radio de trabajo.

Contra-ángulo 20:1

- Reducción 20:1: **gran potencia de corte y precisión**. Especialmente diseñado para osteotomía y el apriete de implantes.
- Su **fibra óptica** permite tener una visibilidad perfecta del campo quirúrgico.
- **Ergonomía y balance**: equilibrio perfecto entre el peso del motor y el contra ángulo para reducir la fatiga de la mano durante procedimientos largos.
- Permite **irrigación interna o externa** según las necesidades del tratamiento.
- Esterilizable en autoclave a 134°C.
- Fresas de cirugía $\varnothing 2,35$ (ISO 1791-1).



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China



Importador mayorista Woodpecker / DTE para España y Portugal
RUMAR Cedeira S.L.
C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid
Tlfno.: 91 849 01 04
Tlfno. móvil / WhatsApp: +34 626 327 863



MICRODENT

MICRODENT IMPLANT SYSTEM

www.microdentsystem.com

info@microdentsystem.com

Telf. 93 844 76 50

Este documento es propiedad de RUMAR Cedeira S.L.

Su uso y reproducción están estrictamente prohibidos sin el consentimiento previo y por escrito del propietario.