



ISTRUZIONI PER L'USO PER LA CHIAVE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL SISTEMA Micro-Loc

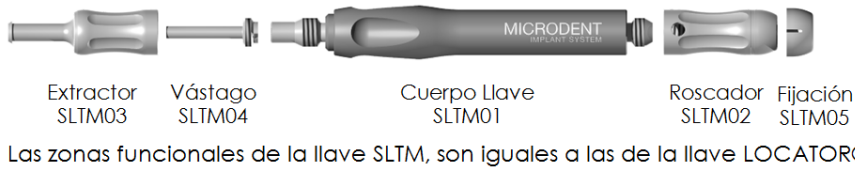


NOTA: per inserire un nuovo fermo o una componente secondaria Micro-Loc, iniziare con il punto 1.
Per rimuovere il fermo in nylon, iniziare con il punto 2.


1. Per posizionare un nuovo fermo in nylon all'interno del cappuccio per overdenture, separare l'accessorio "Extractor" (SLTM03) dal "Corpo chiave" (SLTM01) e utilizzare la parte finale del "Corpo chiave" (SLTM01), come mostra il disegno.

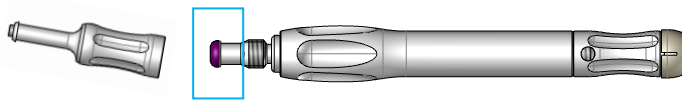


Il "Fissaggio" in plastica (SLTM05), situato sulla punta del "Roscadore" (SLTM02), è progettato per fissare il pilastro Micro-Loc al cacciavite e consentirne la tenuta verticale senza allentarsi, contribuendo a portare il pilastro al bocca del paziente.

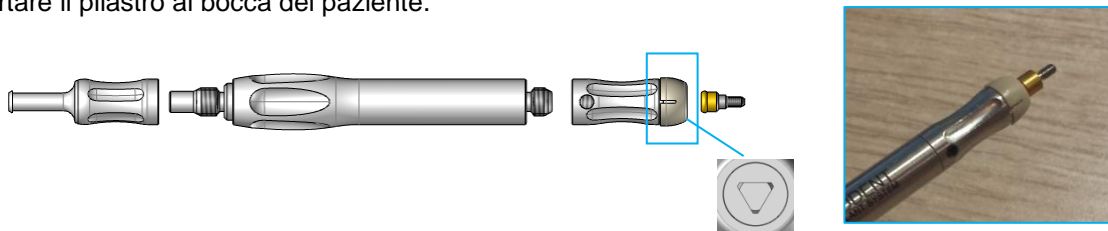


2. Per rimuovere un fermo in nylon attaccato al cappuccio, allentare l'accessorio "Estrattore" (SLTM03) facendo 2 giri completi verso sinistra (vedrete uno spazio visibile).

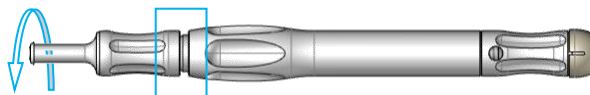

Inserire la punta nell'insieme fermo / cappuccio e spingere verticalmente fino al fondo del fermo in nylon. Quindi inclinare la chiave in modo che il bordo tagliente della punta catturi il fermo, tirandolo indietro e tirandolo fuori dal cappuccio.

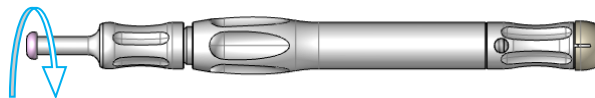

Per scartare il fermo rimosso, puntare la chiave verso il basso allontanandola da voi e girate di nuovo l'accessorio "estrattore" (SLTM03) verso destra nel "Corpo chiave" (SLTM01). Questa manovra attiverà l'estrazione del "gambo" (SLTM04) ed espellerà il fermo in nylon deteriorato dall'estremità appuntita.

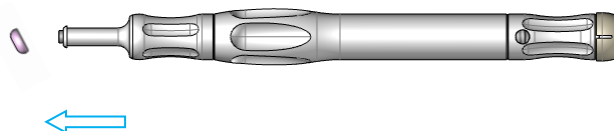

**ISTRUZIONI PER L'USO PER LA CHIAVE DI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL SISTEMA Micro-Loc**

NOTA: non tentare di utilizzare l'accessorio "Estrattore" (SLTM03) per fissare i fermi, poiché potrebbero danneggiarsi.