

CONTENITORE IMPIANTI

IFUI - IMP - ANNESSO (Edizione 1: 01 - 10 - 2021)




1. Aprire la confezione esterna dell'impianto tramite la linguetta laterale.



2. Estrarre il blister contenente l'impianto.



3. Rimuovere il coperchio protettivo del blister tramite l'apposita linguetta.

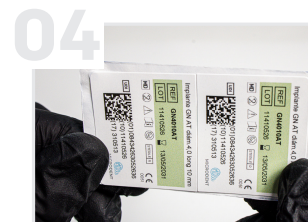

4. Il coperchio protettivo contiene 2 etichette: una deve essere inserita nel passaporto implantare del paziente e l'altra nella cartella clinica.



5. Estrarre dal blister il contenitore dell'impianto. Il tappo in plastica incorpora la vite di copertura dell'impianto.



6. Posizionare il portaimpianto in plastica sull'attacco quadrato del portaimpianto metallico.



7. Estrarre l'impianto sollevandolo verticalmente verso l'alto.



8. È inoltre possibile portare l'impianto in bocca con il contrangolo, inserendolo direttamente nel portaimpianto metallico.