

CONTENITORE IMPIANTI con abutment multifunzione

IFUI - IMP - PMF - ANNESSO
(Edizione 1: 01 - 10 - 2021)




1. Aprire la confezione esterna dell'impianto tramite la linguetta laterale.



2. Estrarre il blister contenente l'impianto.



3. Rimuovere il coperchio protettivo del blister tramite l'apposita linguetta.

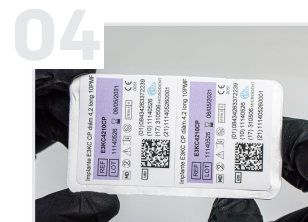

4. Il coperchio protettivo contiene 2 etichette: una deve essere inserita nel passaporto implantare del paziente e l'altra nella cartella clinica.



5. Estrarre dal blister la fiala contenente l'impianto. Il tappo in plastica incorpora la vite di copertura dell'impianto.



6. Rimuovere il tappo dalla fiala.



7. Successivamente, l'impianto può essere rimosso con la chiave manuale per pilastri multifunzione.



8. È inoltre possibile rimuovere l'impianto con la chiave per contrangolo per pilastri multifunzione.



MICRODENT