

CONTENITORE IMPIANTI MONOBLOCCO

IFUI - IMP - WE - ANNESSO
(Edizione 1: 01 - 10 - 2021)



1. Aprire la confezione esterna dell'impianto tramite la linguetta laterale.



2. Estrarre il blister contenente l'impianto.



3. Rimuovere il coperchio protettivo del blister tramite l'apposita linguetta.



4. Il coperchio protettivo contiene 2 etichette: una deve essere inserita nel passaporto implantare del paziente e l'altra nella cartella clinica.



5. Estrarre dal blister la fiala contenente l'impianto.



6. Estrarre l'impianto monoblocco sollevandolo verticalmente verso l'alto.



7. Opzionale: È possibile separare l'impianto monoblocco dal tappo di assemblaggio per facilitarne l'inserimento nei denti del settore posteriore.



MICRODENT