

Per un utilizzo corretto dei nostri prodotti, si raccomanda ai professionisti di seguire corsi di formazione specifici sulle loro applicazioni. Implant Microdent System S.L.U. organizza regolarmente corsi di formazione che forniscono informazioni sulle caratteristiche di ogni componente protesico e soluzione di supporto CAD/CAM, nonché sulla loro corretta applicazione tecnica. Queste informazioni sono disponibili anche sul sito web aziendale, www.microdentsystem.com, e nelle nostre diverse pubblicazioni tecniche.

INDICAZIONI

Implant Microdent System S.L.U. commercializza i prodotti necessari per l'applicazione e l'utilizzo dei suoi sistemi di riabilitazione protesica e delle sue soluzioni digitali.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Per una corretta selezione dei nostri prodotti, consigliamo di consultare i cataloghi tecnici pubblicati. I componenti protesici e il supporto digitale offerti da Implant Microdent System S.L.U. sono realizzati in acciaio inossidabile, titanio ad alta resistenza e polimero ad alta resistenza (POM).

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Confezionamento

Implant Microdent System S.L.U. garantisce che tutti i suoi prodotti siano sottoposti a un processo controllato di produzione, ispezione e pulizia prima del confezionamento. I prodotti sono disponibili in diverse opzioni di confezionamento, ciascuna chiaramente identificata dalla relativa etichetta tecnica.

Condizioni di consegna del prodotto







I prodotti protesici Microdent vengono forniti puliti, ma non sterili. Qualora il flusso di lavoro tecnico richieda la disinfezione o una pulizia profonda prima dell'uso nel processo protesico, si raccomanda di seguire i protocolli di laboratorio standard.

Se, a causa delle esigenze del flusso di lavoro, è necessario un processo di pulizia termica, occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'apparecchiatura utilizzata. Come riferimento tecnico per i materiali termoplastici e metallici, i parametri di resistenza termica sono:

- Temperatura massima: 134 °C
- Tempo di esposizione: 3 minuti.

SIMBOLI DI ETICHETTATURA

Sull'etichetta del prodotto compaiono le seguenti indicazioni:

	Numero di riferimento
	Consulta le istruzioni per l'uso.
	Numero di lotto
	Attenzione, consultare gli avvertimenti
	Fabbricante
	Codice identificativo univoco.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

I prodotti Microdent fanno parte di un concetto completo progettato per la compatibilità con i sistemi Implant Microdent System S.L.U. L'utilizzo di componenti non Microdent può comportare prestazioni non ottimali.

I prodotti devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto. Gli operatori o gli utilizzatori che manipolano questi prodotti sono avvisati del rischio di sensibilità ai materiali descritti nella sezione "DESCRIZIONE DEL PRODOTTO".

Prima dell'uso, è responsabilità del tecnico professionista verificare:

- Le condizioni della confezione e che il codice di riferimento corrisponda al prodotto necessario per il lavoro protesico.
 - L'integrità del prodotto per verificarne le condizioni ottimali.
 - Manutenzione e pulizia:
 - Per una corretta conservazione del prodotto, è necessario seguire le seguenti istruzioni:
 - Non utilizzare detergenti o disinfettanti a base di cloro o acidi.
 - Evitare prodotti contenenti aldeidi.
 - Rimuovere accuratamente eventuali residui dalla superficie o dall'interno del prodotto utilizzando una spazzola con setole di nylon. • Per i prodotti con bordi o aree di regolazione, evitare urti o contatti con altri elementi che potrebbero danneggiare la superficie o i bordi taglienti.
 - Dopo la pulizia, risciacquare con acqua distillata e asciugare accuratamente. Un'asciugatura inadeguata può causare macchie di ossidazione sulla superficie.
- I prodotti non medicali sono soggetti a usura dovuta all'uso. È responsabilità dell'utente sostituire periodicamente questi prodotti per garantire la precisione delle regolazioni protesiche. Implant Microdent System S.L.U. raccomanda di avere sempre a disposizione unità di ricambio.

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E GARANZIA

Qualora l'imballaggio o il prodotto risultassero danneggiati durante il trasporto, Implant Microdent System S.L.U. provvederà alla sostituzione gratuita. La dimostrazione di un uso improprio del prodotto esonera l'azienda dalla suddetta responsabilità.

La garanzia si applica ai prodotti Implant Microdent System S.L.U. a condizione che siano stati utilizzati secondo le istruzioni per l'uso e le raccomandazioni tecniche fornite. Per la restituzione dei prodotti menzionati in tali istruzioni, è necessario seguire le procedure stabilite nelle nostre condizioni generali di vendita e consegna.

Qualsiasi anomalia tecnica deve essere attentamente analizzata per determinarne l'origine e le eventuali deviazioni dal risultato del lavoro, e deve essere debitamente documentata.



Implant Microdent System S.L.U.
Pol. Ind. Can Magre C/. Carles Buïgas, 1
Sta. Eulàlia de Ronçana (Barcelona)