

PROTOCOLO EXTRACCIÓN DE ESPIGAS



1- Visualizar la espiga incrustada.




2- Seleccionar la guía de centrado según conexión y plataforma.



3- Colocar la guía de centrado sobre el implante mediante la llave.



4- Seleccionar la fresa FEX100.

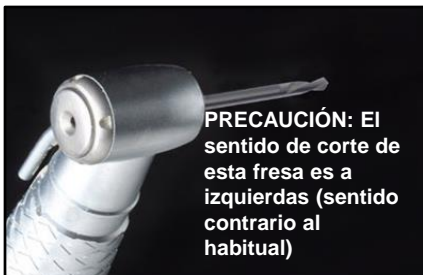

5- Colocar la fresa en el contraángulo.



6. Perforar directamente en la guía de centrado con el contraángulo.



7- Retirar la guía y perforar la espiga con el contraángulo.



8- Seleccionar el punzón de extracción.



9- Insertar el punzón en la espiga.



10- Golpear el punzón con la ayuda de un martillo.



11. Extraer la espiga.

