

Para uma correcta utilização dos nossos produtos, recomendamos que o profissional seja instruído nas particularidades de uso. A Implant Microdent System S.L. realiza regularmente cursos de formação, onde se informa sobre as particularidades de cada um dos componentes do produto, bem como sobre a sua correcta utilização. Estas informações estão disponíveis também na página da empresa em [www.microdentssystem.com](http://www.microdentssystem.com) e nas diversas publicações editadas.

#### INDICAÇÕES

Implant Microdent System S.L. desenvolveu para os microimplantes Microdent Orthodontics Versátil, produtos diferentes que permitem a elaboração do modelo de laboratório que permitirá o desenvolvimento e adaptação de aparelhos ortodônticos exigidas pelo paciente.

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Apresentaremos uma descrição destes produtos, mas para uma escolha pormenorizada, consulte os catálogos de produtos editados.

##### Transferidor

**Indicação clínica:** É indicado para tomar impressões dos microimplantes.

**Material:** O transferidor é fabricado em aço inoxidável.

**Instruções:** O aperto do transferidor sobre o microimplante realiza-se manualmente, não requerendo o uso de ferramentas.

**Precauções:** Antes de inserir o transferidor deve limpar a rosca interna do microimplante. Antes de avançar na impressão, verifique que a face plana do transferidor está alinhada com a face plana do microimplante.

##### Réplica do microimplante

**Indicação clínica:** É indicado para o desenvolvimento de modelos de trabalho no laboratório.

**Material:** A réplica é fabricada em aço inoxidável.

**Instruções:** Aparafuse a réplica ao transferidor, considerando o alinhamento transferidor / réplica e avance na impressão.

**Precauções:** Existe um modelo de réplica para cada família de microimplantes, não sendo compatíveis entre si.

#### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

##### **Embalagem**

Implant Microdent System S.L. garante que todos os produtos Microdent Orthodontics foram submetidos a um processo de fabrico, controlo e limpeza extrema antes de serem embalados.

Os dispositivos não-médicos Microdent Orthodontics podem ser em várias formas de embalagem. Ele vai identificar o produto contido, com a etiqueta correspondente.

##### **Estado de fornecimento dos dispositivos não-médicos**

Os dispositivos não-médicos Microdent Orthodontics são fornecidos no estado **não estéril**. Antes da sua colocação, os produtos devem ser esterilizados. A esterilização deve ser efectuada nas instalações do cliente.

Para proceder correctamente à esterilização do produto, efectuar os seguintes passos:

- Retirar o produto da embalagem em que é fornecido. A embalagem não permite a esterilização adequada do produto.
- Introduzir o produto numa embalagem ou saco adequado para a esterilização e que garanta a não contaminação até à utilização definitiva. Recomenda-se o processo de esterilização a vapor em autoclave. Devem ser tidas em conta as particularidades do equipamento utilizado. Os parâmetros recomendados segundo UNE-EN ISO 17665-1 e UNE-EN ISO 17665-2 são:
  - Temperatura: 134 °C
  - Ciclo de esterilização: 3'

#### SÍMBOLOS DE ROTULAGEM

O rótulo contém as seguintes indicações, consoante o tipo de produto:

	Número de referencia.
	Respeitar as instruções de utilização.
	Número de lote.
	Precaução, consultar advertências.
	Fabricante.

#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Os produtos Microdent Orthodontics fazem parte de um conceito global, estando o seu desenho adaptado aos produtos fabricados pela Implant Microdent System S.L. A utilização de produto alheio à marca pode provocar um comportamento não adequado dos nossos produtos.

Os produtos só devem ser utilizados para a função para a qual foram concebidos.

Alertamos para o risco de toxicidade e alergenicidade em pacientes sensíveis aos materiais descritos no ponto "DESCRIÇÃO DO PRODUTO".

Antes de proceder à cirurgia, é responsabilidade do utilizador verificar:

- O estado da embalagem do produto e se este corresponde ao produto requerido para o paciente.
- O próprio produto para comprovar que está em perfeito estado.

Quando o produto entrar em contacto com agentes contaminantes, nomeadamente sangue e saliva, deve ser limpo e esterilizado antes de ser utilizado em outro paciente.

Para uma correcta limpeza do produto, seguir as seguintes indicações:

- Não utilizar produtos de limpeza ou desinfecção à base de cloro ou ácidos.
- Evitar qualquer produto que contenha aldeídos, devido à sua capacidade para fixar as proteínas.
- Remover cuidadosamente todos os resíduos pós-operatórios presentes na superfície ou no interior do produto. Para isso, utilizar uma escova de nylon.
- No caso de produtos que apresentem arestas cortantes, evitar na medida do possível o choque e o contacto com outros produtos que possam danificar a superfície e/ou o gume das mesmas.
- Imediatamente após a limpeza, enxaguar com água destilada e secar meticulosamente.
- **Secagem inadequadas podem causar a ocorrência de pontos de ferrugem nos produtos.**

O produto está sujeito a desgaste devido ao uso, sendo responsabilidade do utilizador a renovação regular dos produtos.

A Implant Microdent System S.L. recomenda que se disponha de produtos de substituição.

Com carácter geral, durante a utilização intra-oral dos nossos produtos, o utilizador deve tomar as devidas precauções para evitar que possam ser aspirados acidentalmente pelo paciente.

#### RESPONSABILIDADES, SEGURANÇA E GARANTIA

Se, por razões de transporte, a embalagem e o produto contido forem danificados, a Implant Microdent System S.L. restituirá o produto sem qualquer encargo.



## PRECAUÇÕES E NORMAS DE UTILIZAÇÃO PARA DISPOSITIVOS NÃO-MÉDICOS

Sistema microimplantes Microdent Orthodontics

A evidência de manuseamento do produto isenta a empresa da responsabilidade acima indicada.

A garantia só é válida se os produtos da Implant Microdent System S.L. forem utilizados de acordo com as instruções de utilização indicadas.

Para proceder à devolução dos produtos referidos nestas instruções de utilização, devem seguir-se as normas descritas nas condições de venda e fornecimento.

Fabricante: Implant Microdent System S.L.  
Pol. Ind. Can Magre C/. Carles Buigas, 1  
08187 Sta. Eulàlia de Ronçana (Barcelona)